

VACUUM & SPITTOON

New Logic New Method New Cleansing

洗浄

着色
剥離

除菌

ケイ素

point!

1/25 億分メートルの
超微粒子が細かい周波数で

素早く浸透。

有害物質を吸収して
外に排出します。

×

帆立貝焼成 カルシウム

水に加えると水酸化
カルシウムとなり、

point!

アルカリイオン水に。
アルカリパワーが細胞膜を
通過し、強力除菌。



価格については
直接お問い合わせください。

脅威の洗浄力と低コストを
新洗浄メカニズムで実現。

使用方法

◆バキューム、スピットン、排唾管、排水パイプの場合

- ①診療終了後、本液剤を約 50 ~ 100 倍に薄めた溶液を作ってください。
- ②バキューム・排液管に、①で作った溶液を約 180ml、吸引させてください。
- ③スピットン・排水パイプには 150ml ~ 300ml 前後を流し込んでください。
- ④翌朝、水で十分すすいでください。

◆金属製治療器具、バキュームチップ、プラスチック、ゴム製品の場合

- ①診療終了後、本液剤を約 50 ~ 100 倍に薄めた溶液を作ってください。
- ②30 ~ 60 分間、浸漬してください。
- ③流水で充分すすいでください。 ※100 倍 本液剤 (5ml) : 水道水 (約 500ml)

名称	NDC240 (バキューム・スピットン洗浄液)
分類	業務用洗剤
内容量	500ml
原材料名	水、ケイ素、帆立貝焼成カルシウム

お申し込み先 FAX 043-224-7891

歯科医院名	
お名前 様	メールアドレス
ご住所	
TEL (携帯可)	FAX
ご紹介者のお名前 様	TEL

▼ご注文はこちらから▼

NDC240 (バキューム・スピットン洗浄液) 価格については直接お問い合わせください。	
数量	

※ご購入代金 10,000 (税抜) 以下は
送料 850 円が発生いたします。

★ご記入いただきました個人情報は、ご注文の受注業務のみに
使用させていただきます。